

LOTRAFILCON B

LENTI A CONTATTO MORBIDE A PORTO CONTINUO A RICAMBIO MENSILE



ISTRUZIONI PER L'USO – IL PRESENTE FOGLIO ILLUSTRATIVO CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULL'USO CORRETTO E SICURO DEL PRODOTTO. LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN'EVENTUALE CONSULTAZIONE FUTURA. LE LENTI A CONTATTO DEVONO ESSERE SEMPRE APPLICATE DA UNO SPECIALISTA DEL SETTORE. PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLE LENTI È ESSENZIALE ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DELLO SPECIALISTA DI FIDUCIA E A TUTTE LE INDICAZIONI FORNITE SULLA CONFEZIONE DELLE LENTI.

NOMI DEI PRODOTTI:

AIR OPTIX®
AIR OPTIX® for ASTIGMATISM
AIR OPTIX® AQUA
AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL

MATERIALE E CONFEZIONAMENTO

Le lenti a contatto morbide **AIR OPTIX®**, **AIR OPTIX® for ASTIGMATISM**, **AIR OPTIX® AQUA**, **AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL** contengono il 67% di lotrafilcon B e il 33% di acqua, e sono conservate in soluzione salina tamponata con fosfato. La soluzione salina di **AIR OPTIX® AQUA** e **AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL** contiene 1% di Copolymer 845. Le lenti hanno una leggera tinta azzurra per facilitare la manipolazione. La tinta contiene Cu-phthalocyanine.

Le lenti sono sterilizzate in autoclave. **STERILE**
Le lenti sono confezionate in strisce composte da singoli blister. Utilizzare solo se il singolo blister è intatto.

INDICAZIONI D'USO

Le lenti **AIR OPTIX®** e **AIR OPTIX® AQUA** sono destinate per la correzione ottica in persone che non presentano patologie oculari, con lieve astigmatismo che non interferisce con la visione. Le lenti **AIR OPTIX® for ASTIGMATISM** sono destinate alle persone che necessitano di una correzione addizionale per l'astigmatismo. **AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL** sono destinate alle persone che necessitano di una correzione addizionale per la presbiopia.

Tutte queste lenti possono essere indossate per un uso flessibile/prolungato (sino a 6 notti, periodo di sonno incluso), come stabilito dallo specialista di fiducia.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO E LA SOSTITUZIONE

Nell'interesse del mantenimento della salute e la sicurezza dei vostri occhi, la sostituzione delle lenti dovrebbe essere determinata dallo specialista di fiducia.

Le lenti in LOTRAFILCON B sono state sviluppate per essere indossate per un uso prolungato sino a 6 notti (periodo di sonno incluso). Se lo specialista di fiducia non ha prescritto un uso prolungato, non indossare le lenti durante il sonno. Iniziare il nuovo periodo di utilizzo dopo una notte trascorsa senza portare lenti. Poiché le reazioni individuali alle lenti a contatto variano, lo specialista di fiducia potrebbe raccomandare che indossiate le vostre lenti per periodi di uso continuo più brevi. Non tutte le persone possono raggiungere il tempo massimo di utilizzo di 6 notti consecutive.

Le lenti devono essere gettate e sostituite con un nuovo paio ogni mese.

MANIPOLAZIONE DELLE LENTI

Le istruzioni dettagliate per l'inserimento e la rimozione delle lenti a contatto dovrebbero essere fornite dallo specialista di fiducia.

Lavare e asciugare sempre le mani prima di manipolare le lenti. Agitare delicatamente il blister prima di aprirlo. Rimuovere la lamina che ricopre il bister. Versare il liquido e le lenti sul palmo della mano o, se necessario, utilizzare il dito indice, farle scivolare delicatamente fuori dal contenitore. Verificare che la lente non sia capovolta e che sia la lente corretta per quell'occhio. Esaminare le lenti prima di indossarle e non utilizzarle se sono danneggiate.

Prima di rimuovere le lenti, verificare che le mani siano completamente asciutte. Ammicciare più volte guardando verso l'alto e fare scivolare la lente sulla parte bianca dell'occhio.

Rimuovere la lente prendendola delicatamente tra il pollice e l'indice. Se la lente è difficile da togliere, non pizzicare il tessuto oculare. Utilizzare una soluzione lubrificante e umettante e riprovare dopo qualche minuto.

- Non usare mai pinzette, ventose, oggetti appuntiti o le unghie per rimuovere le lenti dal portalenti o dagli occhi.

COME PRENDERSI CURA DELLE PROPRIE LENTI

- **UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLE PROPRIE LENTI È FONDAMENTALE**
- **DISINFETTARE** le lenti ad ogni rimozione, per distruggere germi nocivi e per assicurare un uso sicuro e confortevole
- Lo specialista di fiducia sceglierà il sistema per la manutenzione delle lenti più idoneo. Noi raccomandiamo l'utilizzo dei prodotti seguenti:

Soluzioni disinfettanti al perossido di idrogeno

AOSEPT® Plus

Soluzioni per la pulizia e la disinfezione chimica a freddo

OPTI-FREE® Pure-Moist®

OPTI-FREE® Express®

Soluzioni per il risciacquo

SoftWear® Saline Plus

- Consultare lo specialista di fiducia prima di utilizzare qualsiasi altro prodotto per la manutenzione delle lenti.
- Non alternare o mescolare prodotti per la manutenzione delle lenti appartenenti a sistemi diversi.
- Utilizzare soltanto prodotti per la disinfezione di lenti a contatto morbide, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore.
- **NON UTILIZZARE IL CALORE NE' PRODOTTI FORMULATI PER LENTI RIGIDE O RIGIDE GASPERMEABILI.**

Ricordare sempre quanto segue:

- Lavare, risciacquare ed asciugare sempre le mani prima di manipolare le lenti a contatto.
- Non conservare mai le lenti per tutta la notte solo nella soluzione salina. La soluzione salina NON protegge le lenti dai germi né gli occhi da eventuali infezioni.
- Non riutilizzare la soluzione già usata contenuta nel portalenti.
- Non utilizzare mai le soluzioni dopo la data di scadenza.
- Risciacquare ogni giorno il portalenti con soluzione salina sterile o soluzione unica nuova e, se indicato, lasciarlo asciugare all'aria. Ciò contribuisce ad evitare contaminazioni e gravi lesioni oculari.
- Sostituire regolarmente il portalenti.

SE NON SI PORTANO LE LENTI PER ALCUNI GIORNI, seguire le istruzioni del programma di disinfezione e, se necessario, pulire e disinfettare di nuovo le lenti, prima di rimetterle.

QUANDO NON UTILIZZARE LE LENTI

Le lenti non devono essere indossate in concomitanza con alcune condizioni di salute o ambientali. Le condizioni che possono interferire con un uso sicuro delle lenti a contatto, sono:

- Allergia, infiammazione, infezione o irritazione all'interno o intorno all'occhio o alle palpebre.
- Periodi di cattiva salute, come forti raffreddori o influenza.
- Uso di alcuni farmaci, inclusi farmaci oftalmici
- Lacrimazione insufficiente (secchezza oculare).
- Ambienti eccessivamente asciutti o polverosi, che possono rendere poco confortevole l'utilizzo delle lenti.
- Sport acquatici senza l'uso di occhiali da piscina.

Consultare il proprio specialista di fiducia su queste o altre condizioni.

PROBLEMI POSSIBILI

Anche se le lenti a contatto morbide offrono numerosi vantaggi a chi le indossa, è possibile che si manifestino inconvenienti, riconoscibili in una o più delle seguenti condizioni:

- Sensazione di corpo estraneo
- Lenti fastidiose
- Rossore oculare
- Sensibilità alla luce
- Bruciore, fitte, prurito o lacrimazione accentuata
- Riduzione dell'acuità visiva
- Arcobaleno o aloni intorno alle luci
- Aumento della secrezione oculare
- Fastidio/dolore
- Secchezza oculare grave o persistente

Questi sintomi, se ignorati, possono provocare complicanze gravi.

CHE COSA FARE SE SI MANIFESTA UN PROBLEMA

Se si verifica uno dei sintomi precedenti:

- **RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LALENTE (O LE LENTI).**
- Se si fastidi o i problemi cessano, indossare una lente nuova.
- Se la(e) lente(i) è in qualche modo danneggiata, NON riutilizzarla(le), ma sostituirla(le) con una lente(i) nuova o consultare lo specialista di fiducia.
- Se la(e) lente(i) è(sono) sporca(che) o presenta ciglia o altri corpi estranei, o se il problema scompare e la(e) lente(i) non appare danneggiata, è sufficiente sciacquarla bene e disinfettarla prima di indossarla nuovamente.
- Se i sintomi citati persistono dopo l'inserimento della(e) lente(i) nuova(e), rimuovere la(e) lente(i) **IMMEDIATAMENTE** e consultare tempestivamente il proprio specialista di fiducia. Potrebbe essere presente una condizione seria quale infezione, ulcera corneale (cheratite ulcerativa) o irite. Queste condizioni potrebbero progredire rapidamente, provocando la perdita permanente della vista. Reazioni meno gravi quali abrasioni, colorazioni epiteliali e congiuntiviti batteriche, devono essere affrontate e trattate tempestivamente per evitare complicanze.
- La secchezza occasionale può essere risolta ammiccando più volte o utilizzando gocce lubrificanti o umettanti. Se la secchezza persiste consultare lo specialista di fiducia.
- Se una lente aderisce (smette di muoversi) applicare alcune gocce di soluzione lubrificante e aspettate finché la lente non inizia a muoversi liberamente nell'occhio prima di cercare di rimuoverla. Se la lente continua ad aderire, contattare **IMMEDIATAMENTE** lo specialista di fiducia.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

È stato dimostrato che il rischio di cheratite ulcerativa è maggiore tra gli utilizzatori di lenti ad uso prolungato che tra gli utilizzatori di lenti ad uso diurno. L'utilizzo delle lenti a contatto aumenta il rischio di infezioni oculari. Il fumo aumenta il rischio di cheratite ulcerativa nei portatori di lenti a contatto.

COSE IMPORTANTI DA RICORDARE

- Non condividere le proprie lenti con nessuno in quanto potrebbero verificarsi contaminazioni microbiche tali da provocare gravi problemi alla salute oculare.

- Controllare ogni giorno i propri occhi. Assicurarsi che la visione sia chiara, non diano fastidio e abbiano un aspetto sano.
- Si raccomanda ai portatori di lenti a contatto di recarsi regolarmente dal proprio specialista come indicato.
- Non utilizzare le lenti dopo la data di scadenza.
- In condizioni di poca luce i portatori di lenti colorate potrebbero riscontrare una visione ridotta degli oggetti a basso contrasto. I portatori di lenti a contatto multifocali potrebbero riscontrare una visione ridotta in tutte le condizioni di illuminazione.
- Annotare la corretta gradazione della lente per ciascun occhio.
- Prima di indossare la lente verificare che la gradazione indicata su ciascun blister sia corretta.
- Portare sempre con sé lenti di ricambio.
- Prestare attenzione all'uso di saponi, lozioni, creme, cosmetici o deodoranti, poiché possono provocare irritazione se vengono a contatto con le lenti.
- Inserire le lenti **prima** di truccarsi e rimuoverle **prima** di struccarsi.
- Evitare l'utilizzo prodotti spray vicino agli occhi quando si indossano le lenti, poiché potrebbero provocare irritazione.
- Consultare lo specialista di fiducia per l'utilizzo delle lenti durante le attività sportive, incluso il nuoto.
- In caso di esposizione a vapori nocivi o irritanti, rimuovere le lenti.
- Le lenti a contatto non devono mai entrare in contatto con acqua non sterile (inclusa l'acqua di rubinetto e saliva) in quanto possono verificarsi contaminazioni microbiche che potrebbero provocare danni permanenti agli occhi.
- Informare il proprio datore di lavoro che si indossano le lenti a contatto, in particolare se il lavoro prevede l'impiego di dispositivi di protezione oculare.



Fabbricante:
CIBA VISION Corporation
11460 Johns Creek Parkway
Duluth, Georgia 30097, USA



Mandatario per l'UE:
CIBA VISION GmbH
Industriering 1
63868 Grosswallstadt, Germany

Abbreviazioni per le specifiche delle lenti:

DIA	Diámetro
BC	Raggio base
PWR	Potere
CYL	Cilindro
AXIS	Asse
LO	Bassa
MED	Media
HI	Alta
ADD	Addizione
MAX	Massimo
L	Sinistra
R	Destra

MAT 111056/17-08-12/P9